

**新発売！！**  
オミクロン株などの  
変異株対応しています！

# 新型コロナウイルス抗原検査キット

口にくわえるだけで検査できるペンタイプ

検査キットを口にくわえるだけの新型コロナウイルス抗原検査キット。(研究・試験用)  
検査キットを口にくわえ、採取した唾液で検査を行います。  
検査判定まで約15分。変異株にも対応。  
従来の抗原検査キットよりも手間なく簡単に検査することが可能で、子供からお年寄りまでいつでもどこでも手軽に検査ができます。

ワクチンを接種していても完全に新型コロナウイルスの感染を防ぐことはできません。  
抗原検査キットを自宅やオフィスに備え、いざという時すぐに検査ができることは、有効な感染防止・クラスター防止対策といえます。



## 検査方法

※正しい検査結果を得るために、検査前に口の中をきれいにした後、  
飲食や喫煙をせず、30分経過後に検査を開始してください。

### STEP1



検査キットの青いキャップを外し、図のように先端部分を舌下部に置き口にくわえる。

### STEP2




唾液の浸透が観察窓の真ん中まで達したら検査キットを口から外し、平らな場所に置く。

### STEP3



10分～15分ほど待ち、結果を判定します。


## 検査結果

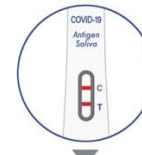

### 抗原を検出

C・Tにラインが表示


抗原が検出されたことを意味します。医療機関、保健所等の指示に従い、PCR検査等の確定診断を受診してください。

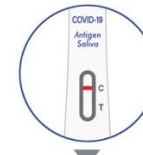

### 抗原未検出

Cにラインが表示され、Tにラインが表示されない

抗原が検出されていないことを意味します。この結果が出た場合でも、抗原の濃度が低い場合は、未検出の結果が出ることもあり、感染の可能性を排除することはできません。

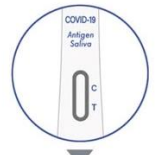

### 検査結果無効

Cにラインが表示されない

不十分な検体量や不適切な手順により、検査結果は無効となります。別の検査キットでの再検査が必要です。

## 留意事項

- ・研究用は新型コロナウイルス感染の有無を調べることを目的としているものではありません。
- ・抗原が検出されても自己判断せず、受信相談センター又は医療機関に相談してください。

**先行予約専用チラシ**

 輝龍株式会社

〒336-0015  
埼玉県さいたま市南区太田窪3506-11 輝龍ビル  
TEL : 048-711-8891 FAX:048-788-5900

**販売開始2022年2月15日～**  
**順次発送予定**

# 発注書

FAX: 048-788-5900

担当者名

輝龍株式会社宛

## 抗原検査キット

唾液を採取するタイプ 数量限定！早いもの勝ちです！

個数	送料	金額 (税込)
1～24個	お客様の負担をお願い致します	1回あたり ¥1,760
25～49個	お客様のご負担をお願い致します	1回あたり ¥1,430
50～99個	弊社が負担いたします	1回あたり ¥1,155
100個～		1回あたり ¥990

※50個以上は在庫の兼ね合いもあるので要相談

抗原検査キット 唾液タイプ	個数	総額(税込)	円
	個		

## ■発注者情報

発注日	年	月	日
社名(担当者)・氏名			
住所			
TEL			

## ■宅急便での発送をご希望の方は下記項目に✓をご記入ください。

時間指定	<input type="checkbox"/> 指定なし
	<input type="checkbox"/> 14時～16時 <input type="checkbox"/> 16時～18時 <input type="checkbox"/> 18時～20時 <input type="checkbox"/> 19時～21時

## ■お支払方法 いずれかに✓をご記入ください。

銀行振込	振込先：埼玉縣信用金庫 大間木支店 普通 0786233 輝龍株式会社 代表取締役 野村晃一 ※入金確認後に発送致します。
請求書	お品物発送時に同梱致します。 ※2週間以内でのお振込み及び振込手数料はお客様の負担にてお願い申し上げます。
現金	納品時にご集金致します。

## ■お問い合わせ先 輝龍株式会社

担当者：松本 TEL：070-1642-0744



※発注書をFAXにて送信して頂くか、直接担当者にお渡しください。

※QRコードからも発注が出来ます。